



**Diskret. Zuverlässig.
Einfach in der Anwendung.**

Kondomurinale – für mehr Freude am aktiven Leben.

Patienteninformation Kondomurinale

Für die alternative Versorgung der
männlichen Harninkontinenz

Liebe Leserin, lieber Leser,

Harninkontinenz ist für viele ein Tabuthema – und dies, obwohl mit dieser Thematik ein enormer Leidensdruck einhergeht. Wir möchten Ihnen mittels unserer Informationsbroschüre ein urologisches Hilfsmittel zur Versorgung der männlichen Harninkontinenz vorstellen, das Sie bei der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben unterstützen kann.

Das UROMED Silikonkondomurinal stellt bei bestimmten Formen der Harninkontinenz eine komfortable Alternative zu aufsaugenden Produkten wie Inkontinenzeinlagen und -vorlagen dar.

Die Form des Kondomurinals ähnelt einem herkömmlichen Kondom – daher ist es besonders diskret zu tragen. Die Spitzenausformung erlaubt, einen Urinbeutel anzuschließen. Eine selbstklebende Innenfläche und das äußerst flexible Material sorgen für einen sicheren Halt auf der Haut – bis zu 24 Stunden. Um Ihnen ein angenehmes Tragegefühl zu ermöglichen, bestehen die UROMED Silikonkondomurinale aus atmungsaktivem, hautfreundlichem Silikon.

Fragen Sie Ihren Arzt nach weiteren Informationen oder wenden Sie sich gerne direkt an uns.

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihr UROMED Team

RUFEN SIE GLEICH AN
040 71 30 07-0

oder senden Sie eine E-Mail an service@uromed.de

Diskret. Zuverlässig.
Einfach in der Anwendung.


Kondomurinale – für mehr Freude am aktiven Leben.

Ihre Bedürfnisse sind uns wichtig. Ihre Vorteile auf einen Blick.

- ✓ Im Gegensatz zu aufsaugenden Produkten kommt der Genitalbereich unter der Anwendung eines Kondomurinals nicht dauerhaft mit dem Urin in Kontakt – dies hilft, Hautirritationen zu vermeiden.
- ✓ Durch die geschlossene Ableitung des Urins in einen Urinbeutel kann eine Geruchsbildung vermieden werden.
- ✓ Das Kondomurinal ist diskret zu tragen und bietet Ihnen die Möglichkeit, mit mehr Freude am aktiven Leben teilzunehmen.
- ✓ Mit etwas Übung lässt sich ein Kondomurinal einfach und mit geringem Aufwand anlegen.
- ✓ Die Ableitung des Urins über ein außerhalb des Körpers angebrachtes Hilfsmittel ist komfortabler als eine Vielzahl anderer Versorgungen.
- ✓ Da das Kondomurinal außerhalb des Körpers angebracht wird, besteht im Vergleich zu Dauerkathetern bei korrekter Anwendung lediglich ein geringes Risiko eines Harnwegsinfektes.
- ✓ Wir bieten Ihnen verschiedene Ausführungen an, damit Ihr Kondomurinal perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sämtliche UROMED Silikonkondomurinale bestehen aus transparentem, reinem Silikon – somit sind sie atmungsaktiv, besonders hautfreundlich und weisen ein sehr geringes allergenes Potential auf.
- ✓ Sie können UROMED Urinbeutel verwenden – je nach Bedarf für die Tag- und Nachtversorgung. Im UROMED Sortiment finden Sie entsprechende Bein- und Bettbeutel sowie dazu passende Haltesysteme.

Aufbau eines UROMED Silikonkondomurinals.

Zur Veranschaulichung eines UROMED Silikonkondomurinals dient Ihnen die folgende Abbildung:

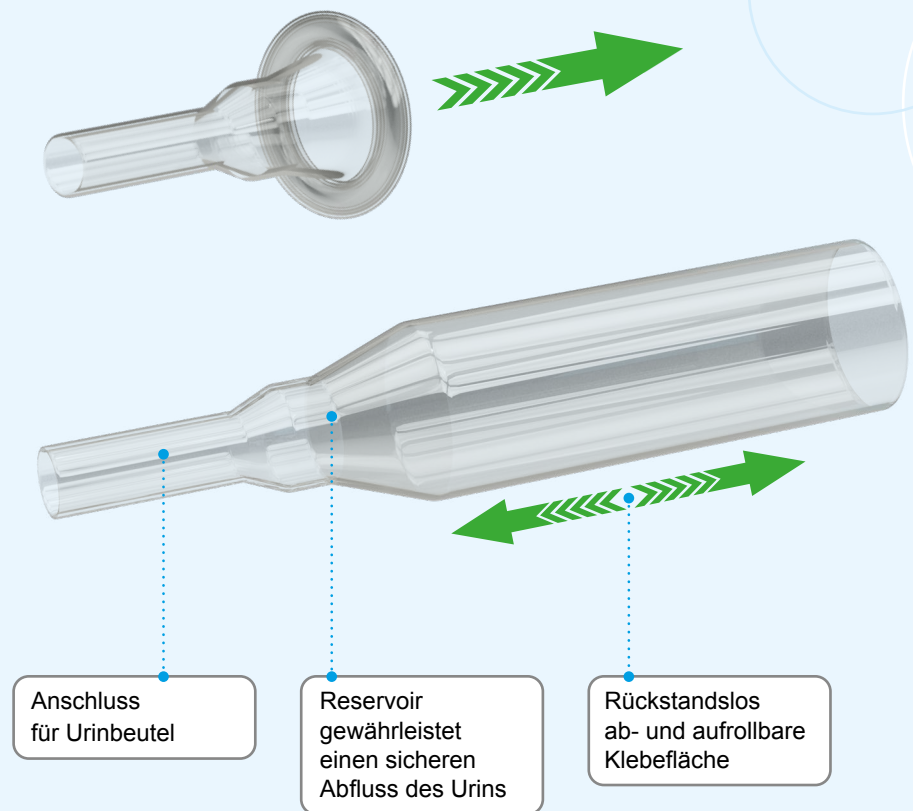

Abbildungen nicht maßstabsgetreu

Überlegen Sie, ob das UROMED Silikonkondomurinal für Sie das geeignete Hilfsmittel sein kann?

Um Sie bei dieser Entscheidung zu unterstützen, möchten wir Erfahrungswerte mit Ihnen teilen. Grundvoraussetzung ist, dass Sie als Betroffener informiert und bei der Hilfsmittelauswahl miteinbezogen werden, damit Ihre Akzeptanz sichergestellt ist. Nur dann kann das Kondomurinal erfolgreich eingesetzt werden:



Wir empfehlen das Kondomurinal insbesondere für Anwender mit leichter bis mittlerer Harninkontinenz. Ein kontinuierlicher Urinverlust hingegen könnte dazu führen, dass die Klebefläche des Kondomurinals wesentlich schlechter haften kann.

Das Kondomurinal haftet über eine Klebefläche sicher auf der Haut. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte die Anatomie des Penis daher mindestens eine Daumenlänge betragen.

Hauterkrankungen oder -defekte im Intimbereich schließen die Anwendung eines Kondomurinals bis zur vollständigen Abheilung aus.

Das Anbringen eines Kondomurinals verlangt eine ausreichende Handmotorik und Fingerfertigkeit. Sollte diese nicht vorhanden sein, so kann Sie eine Pflegefachkraft oder eine andere Person Ihres Vertrauens bei der Anwendung unterstützen.

Kondomurinale sind insbesondere für eine nächtliche Versorgung geeignet – zur Entlastung der Betroffenen und etwaiger pflegender Bezugspersonen.

Zudem tragen Kondomurinale häufig erfolgreich zum Erlangen einer „sozialen Kontinenz“ bei, indem diese stundenweise am Tag zur Teilnahme am sozialen Leben wie z. B. bei Theater-, Café- oder Kirchenbesuchen getragen werden.

Ungünstig auf die erfolgreiche Anwendung eines Kondomurinals können sich starkes Übergewicht, eine gleichzeitig bestehende Stuhlinkontinenz sowie demenzielle Einschränkungen auswirken.

Mit Sicherheit gut versorgt. Tipps zur Anwendung.

Ermittlung der Kondomurinalgröße

- Der Messpunkt zur Größenermittlung mittels Messschablone liegt direkt hinter der Eichel.
- Die Vorhaut – sofern vorhanden – darf bei der Messung nicht zurückgezogen sein.

Vorbereitung

- Der Intimbereich muss gründlich rasiert sein – d. h. 3-5 cm zirkulär um die Peniswurzel herum glatt rasiert.
- Der Intimbereich muss trocken und frei von fettenden Rückständen sein.

Anwendung

- Das Kondomurinal muss im unabgerollten Zustand mittig auf die Penisspitze aufgesetzt werden.
- Die Vorhaut – sofern vorhanden – ist dabei nicht zurückzuziehen.
- Das Kondomurinal muss glatt und faltenfrei am Penis anliegen.
- Nach Abrollen des Kondomurinals sollte der Schwellkörper durch sanften Druck auf die Peniswurzel fest in das Kondomurinal gedrückt werden.
- Um die Haftung zu unterstützen, ist es empfehlenswert, den Penis mit der Handinnenfläche vollständig zu umfassen und das Kondomurinal für einige Sekunden sanft anzudrücken.
- Das Kondomurinal muss korrekt an den Urinbeutel angeschlossen werden. Dies bedeutet, dass der Schlauch des Urinbeutels nicht verdreht oder zu lang sein darf.
- Der Urin muss über das Kondomurinal immer nach unten abgeleitet werden. Der Schlauch des Urinbeutels muss direkt am Körper anliegen – d. h. unterhalb der Kleidung und Unterwäsche. Unsterile Schläuche lassen sich bei Bedarf kürzen (siehe Gebrauchsanweisung).
- Während der Tagversorgung ist der Urinbeutel mit einem geeigneten Haltesystem am Ober- oder Unterschenkel zu tragen.

- Bei der Nachtversorgung muss der Urinbeutel so tief wie möglich, auf jeden Fall unterhalb des Blasenniveaus, befestigt werden.
- Bei selbstständiger Anlage empfehlen wir Ihnen eine stehende Position. Bei Anlage des Kondomurinals durch eine Pflegeperson empfehlen wir Ihnen, eine liegende Position einzunehmen.

Entfernung

- Das Kondomurinal sollte von der Peniswurzel langsam in Richtung Eichel gerollt werden.
- Das Kondomurinal lässt sich durch warmes Wasser leichter ablösen.

Ihr PLUS an Lebensqualität. Bestellen Sie Ihre kostenlosen Muster noch heute.

Die UROMED Silikonkondomurinale sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich – und somit auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.


Welche Ausführung für Sie geeignet ist, hängt im Wesentlichen von Ihrer Anatomie sowie Ihren individuellen Tragebedürfnissen ab.

Haben Sie Interesse daran, das UROMED Silikonkondomurinal auszuprobieren? Dann senden wir Ihnen gerne diskret kostenlose Muster zu. Das UROMED Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

**BESTELLEN SIE JETZT IHRE
KOSTENLOSEN MUSTER**
040 71 30 07-0
oder senden Sie eine E-Mail an service@uromed.de



UROMED. Ihr Ansprechpartner für eine bedarfsgerechte Komplettversorgung.

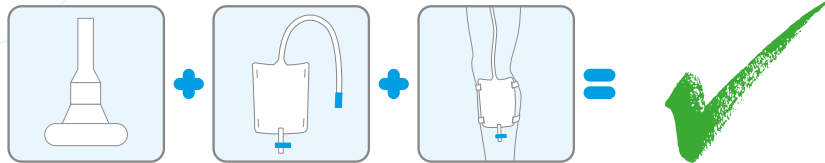

UROMED hat sich innerhalb der letzten 50 Jahre zu einem der führenden Anbieter für urologische Medizinprodukte und Hilfsmittel zur ableitenden Inkontinenzversorgung entwickelt.

UROMED bietet Ihnen als Spezialist in der Urologie ein umfangreiches Produktsortiment.

Neben den UROMED Silikonkondomurinalen umfasst dieses auch die von Ihnen zur bedarfsgerechten Versorgung benötigten Urinbeutel. Die unterschiedlichen Urinbeutel gewährleisten durch ihre unterschiedlichen Füllmengen und Schlauchlängen sowohl eine zuverlässige Tag- als auch Nachtversorgung.

Die UROMED Haltesysteme für Urinbeutel komplettieren Ihre Versorgung mit Kondomurinalen.

Bei der Versorgung und der Auswahl der geeigneten Hilfsmittel stehen Sie und Ihre Präferenzen bei uns im Mittelpunkt. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Zubehörs.

Unser Serviceversprechen. Rundum gut versorgt.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Fragen rund um das Produkt und die Anwendung zur Verfügung. Unser kompetentes und empathisches UROMED Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Zudem sind unsere examinierten Pflegefachkräfte und geschulten Medizinprodukteberater deutschlandweit für UROMED im Einsatz. Diese weisen Sie nach einem ersten Telefonat zur Bedarfsklärung mit viel Expertise und Einfühlungsvermögen in die Hilfsmittelversorgung ein – immer mit dem Ziel, Ihnen zu mehr Lebensqualität zu verhelfen.

Für mehr Freude am aktiven Leben.

Sie sind mehr der visuelle Typ?

In unserem neuen Anwendervideo führen wir Sie Schritt für Schritt in die korrekte Handhabung der UROMED Silikonkondomurinale ein.



Überreicht durch:

UROMED ist Fördermitglied von:

- Deutsche Kontinenzgesellschaft e. V.
- Inkontinenz Selbsthilfe e. V.

UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11
D-22113 Oststeinbek

Zentrale	+49 40 71 30 07- 0
Kliniken	+49 40 71 30 07- 11
Praxen	+49 40 71 30 07- 21
Apotheken/Handel	+49 40 71 30 07- 31
Pflegedienste/Altenheime	+49 40 71 30 07- 33

Fax +49 40 71 30 07- 99

E-Mail service@uromed.de

Internet www.uromed.de



Die Angaben entsprechen unserem
Kenntnisstand bei Drucklegung. Produktänderungen
aufgrund technischen Fortschritts vorbehalten.

Material-Nr. 0022 · Rev. 2 · 02/2021

©UROMED Kurt Drews KG

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

* Artikelnummer
** Pharmazentralnummer

UROMED Silikonkondomurinal «sportiv»

- große Haftfläche für maximale Sicherheit bei sportlicher Aktivität oder aktivem Alltag
- durch optimale Klebefläche und Reservoir auch für Rollstuhlfahrer bestens geeignet
- sichere Konnektion mit UROMED Urinbeuteln
- sehr gutes Abrollverhalten

REF*	Ø	Klebefläche	PZN**
4960.24	24 mm	60 mm	13650188
4960.28	28 mm	60 mm	13650194
4960.31	31 mm	60 mm	13650202
4960.35	35 mm	60 mm	13650219

Hilfsmittelkatalog: 15.25.04.7036



Verpackung: einzeln, unsteril, hygienisch im Polybeutel
Originalkarton: 30 Stück


UROMED Silikonkondomurinal «standard»

- Kurzkondom für den retrahierten Penis
- Klebefläche ist optimal an anatomische Gegebenheiten angepasst
- sichere Konnektion mit UROMED Urinbeuteln
- sehr gutes Abrollverhalten

REF	Ø	Klebefläche	PZN
4940.24	24 mm	40 mm	13650159
4940.28	28 mm	40 mm	13650165
4940.31	31 mm	40 mm	13650171

Hilfsmittelkatalog: 15.25.04.7035

Verpackung: einzeln, unsteril, hygienisch im Polybeutel
Originalkarton: 30 Stück

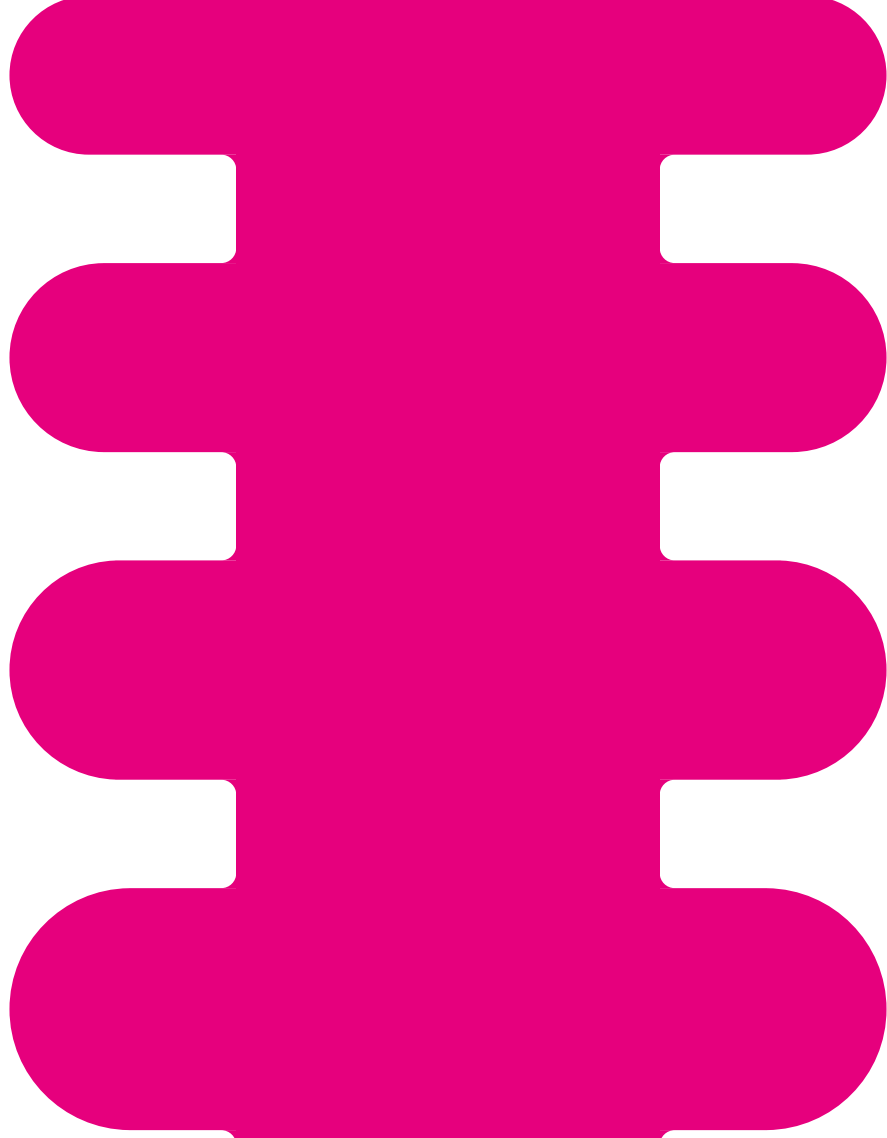

02/2021

Durchmesser
35 mm

Durchmesser
31 mm

Durchmesser
28 mm

Durchmesser
24 mm



Über der jeweiligen Aussparung in der Schablone ist der Durchmesser angegeben, der auch gleichzeitig die Endziffer der Artikelnummer ist. Diese übermitteln Sie bitte Ihrem behandelnden Arzt zur Rezeptierung oder direkt an UROMED.

Die Wahl der korrekten Kondomurinalgröße und des Modells ist entscheidend für Ihren Komfort und die Tragezeit. Vor einer ersten Anwendung des Kondomurinals erfolgt die Auswahl der passenden Größe mit Hilfe dieser Messschablone. Messen Sie dazu den Durchmesser Ihres Penis – der Messpunkt befindet sich direkt hinter der Eichel. Um die Messergebnisse nicht zu verfälschen, stellen Sie bitte sicher, dass die Vorhaut – sofern vorhanden – bei der Messung nicht zurückgezogen ist.

Messschablone für UROMED Silikonkondomurinale.

